

R-Brush

Treating Periimplantitis



Elimine Fácilmente la Superficie Infectada del Implante

Round Brush

Limpieza Precisa para Tratamiento de Periimplantitis

R-Brush

R-Brush es un cepillo redondo desechable para limpieza por periimplantitis: la mejor solución para tratar la superficie infectada del implante. Diseñado para tratar la superficie infectada del implante en casos de periimplantitis a fin de reducir el proceso de pérdida ósea. Los cepillos de aleación de titanio rotan alrededor del implante y quitan la zona infectada, formando al mismo tiempo una nueva superficie rugosa que acelera la oseointegración.

2000-5000 RPM con irrigación (1:1)



Cómo Usar



Pérdida de hueso alrededor del implante




Después de quitar la prótesis y el pilar, conectar la tapa protectora al implante



Limpiar la superficie expuesta del implante con movimiento recíproco vertical



Usar el R-Brush para zonas donde R-Brush no puede llegar: suturar una vez realizada la GBR

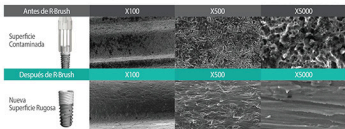

Nueva superficie rugosa después de tratar la periimplantitis con R-Brush para una mejor re-oseointegración

